

Stimate Domnule Doctor / Stimate Doamnă Doctor,



Prin prezenta avem plăcerea de a vă transmite câteva informații importante legate de **implantarea LIO SML Medicontur**, după cum urmează:



Nu se recomandă SML pentru pacienții cu probleme ca:

- DMLV neovascular activ
- Dacă valoarea acuității vizuale postoperatorie este mai mică de 0.1 sau mai mare de 0.32 (Anexe ETDRS, decimal)
- Iris neovascularizat
- Iris atrofiat
- Coagulopatie severă
- ACD < 2.8mm (de la endotel)
- Unghi îngust < gradul 2 Schaefer
- Stare complicată în cazul post-intervenției chirurgicale
- Anomalie congenitală a ochiului
- Glaucom avansat cu defecte majore de câmp vizual
- Sindromul de dispersie a pigmentilor
- Ambliopie
- Uveită
- Tratament pe termen lung anti-inflamator
- Desprindere de retina
- Boli ale corneei ce implică zona centrală a corneei
- Vizualizare inadecvată a fundusului în examinarea pre-operativă.
- Pacienții diagnosticați cu boli sistemice.
- Pacientele însărcinate
- Trauma severă la ochi în istoria pacientului

- Anomalii pupilare, pupilă fotopică < 2.5 mm
- Complicații chirurgicale neașteptate

Sunt recomandate procedurile de topografie, pupilometrie și biometrie optică, înainte de orice intervenție.

Cu stimă,
Kembli-Med Srl